

Zoomax[®] Snow 7 HD

Videoingranditore portatile elettronico



Manuale utente

Versione italiana V.1

ZOOMAX Technology, Inc., Qianyun Road Qingpu Area
Shanghai, China. 200120, Shanghai, China. 200120

Copyright © 2013 ZOOMAX Technology, Inc., tutti i diritti
riservati. ZOOMAX ® è un marchio di ZOOMAX
Technology, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

La riproduzione e la distribuzione di questa pubblicazione
o di parti di esso, per qualsiasi scopo in qualsiasi forma
senza l'espresso consenso scritto proibito da ZOOMAX.

Se avete domande o suggerimenti riguardanti l'utilizzo di
questo prodotto, messe in contatto il vostro distributore o la
sede ZOOMAX e-mail sales@zoomax.co. Il vostro
riscontro sarà molto apprezzata.

Per andare alla FAQ visitare homepage www.zoomax.co

Grazie per aver scelto Snow 7 HD!

Snow 7 HD è leggero e di dimensioni contenute, per essere portato sempre con voi.

- Questo Videoingranditore Snow 7 HD è unico nel suo genere, perché possiede una messa a fuoco elettronica automatica che consente di visualizzare e ingrandire testi e immagini stampate ad alta qualità con risoluzione HD a colori o in una dei modi ad alto contrasto.
- Quando è aperto, garantisce un perfetto angolo di lettura e permette di spostarsi facilmente sul testo
- Snow 7 HD è dotato di un display da sette pollici.
- Leggero solo 480 grammi. Ideale per il trasporto o l'uso a casa per leggere.
- Menu Impostazioni con icone grandi e intuitive Batteria ricaricabile, con un'autonomia di utilizzo di quattro ore in uso continuo.

Sommario


Accessori	1
Funzionamento	2
Ricarica della batteria.....	3
Regolare l'ingrandimento	6
Modalità di visualizzazione.....	7
Pulsante foto di scena.....	9
Istruzione di scrittura.....	10
LED l'indicatore luminoso on/off	12
Modificare luminosità dello schermo	12
Collegamento al televisore	13
Standby.....	13
Funzione di memoria	14
Veduta vicino/a distanza	14
Prevenzione e diagnosi dei guasti.....	15
Sicurezza	16
Informazioni tecniche	17

Accessori

La confezione die ZOOMAX Snow 7 HD contiene:


1. Videoingranditore portatile elettronico Snow 7 HD
2. Custodia protettiva
3. Manuale utente
4. Cavo HDMI
5. Spine intercambiabili
6. Panno morbido per pulire lo schermo

Funzionamento videoingranditore

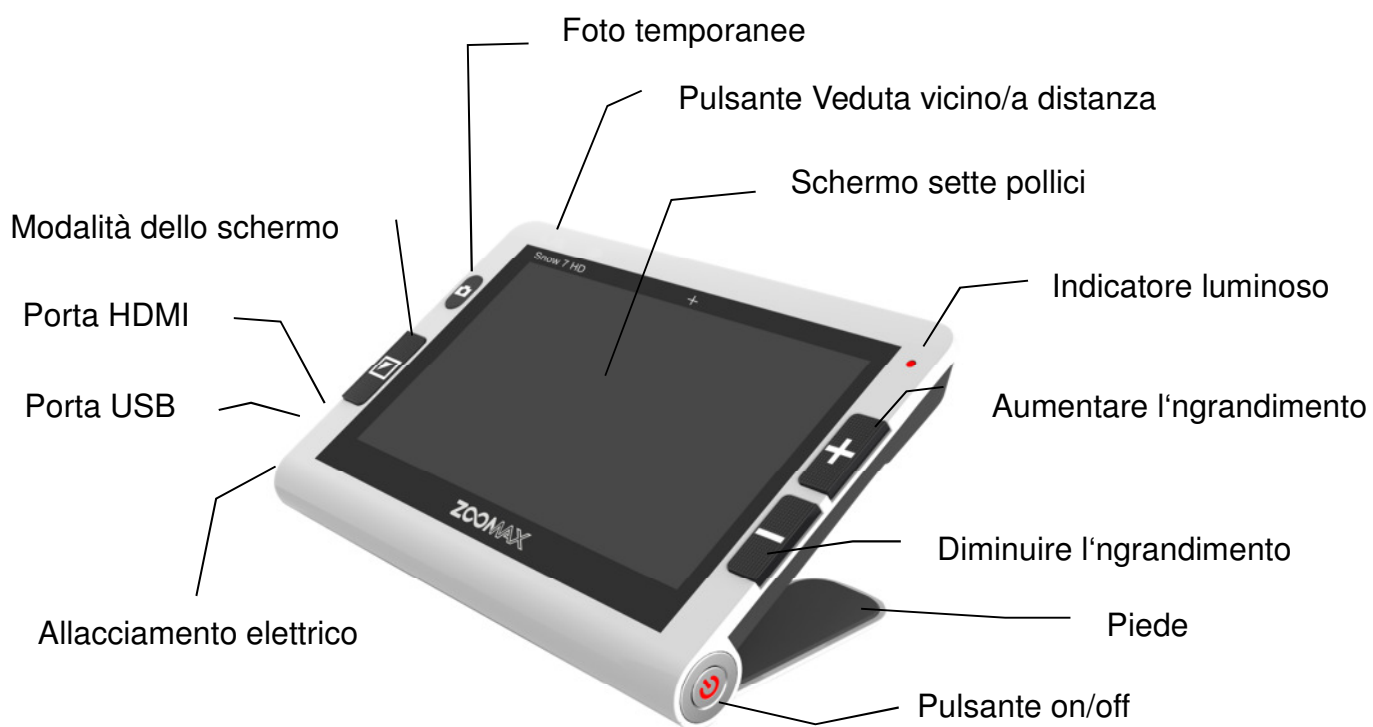

Ricarica della batteria



- Prima di accendere lo Snow 7 HD per la prima volta, occorre caricare la batteria.
- Mentre il processo di carica l'indicatore luminoso, s'illumina in rosso.
- Quando l'apparecchio è caricato l'indicatore luminoso, si spegne.
- Quando la batteria è scarica,  occorre caricare di nuovo.
- La ricarica di Snow 7 HD richiede circa 4 – 5 ore.
- A piena carica Snow 7 HD è in grado di operare per un tempo medio di quattro ore.

Avviso batteria scarica


- Quando la carica della batteria è inferiore della sua capacità totale, ogni cinque secondi saranno emessi un segnale sullo schermo. In questo caso, caricare l'unità al più presto possibile.
- Quando la batteria è scarica, l'unità si spegnerà automaticamente.
- Se l'unità non si accende, assicurarsi che la batteria sia carica.

Pulsante On/Off



- Premendo per due secondi il pulsante " **On/Off** ", si accende l'apparecchio.
- L'indicatore luminoso lumina verde.
- Premendo per due secondi il pulsante " **On/Off** " si spegne l'apparecchio.
- L'indicatore luminoso si spegne.
- Per risparmiare energia, l'unità si spegne dopo tre minuti di se stesso, se l'attività è interrotta.

Regolare l'ingrandimento

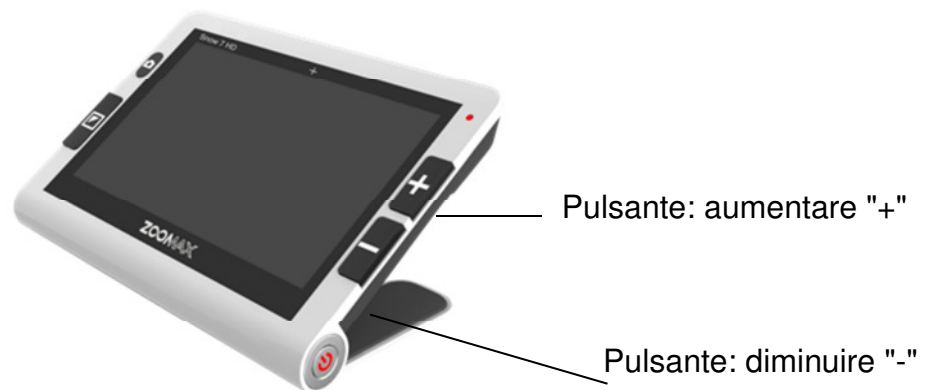

- Premendo per un secondo il pulsante " + " alla destra dello schermo, è possibile aumentare o diminuire con il pulsante " - " l'ingrandimento.
- L'ingrandimento minimo da 2,2 a 19 volte.
- Quando l'unità è collegata a un televisore, l'ingrandimento può essere aumentato di più.

Modo di visualizzazione



Premendo la pulsante " Modalità " alla sinistra dello schermo, è possibile selezionare un altro alto contrasto. In tutto con dodici diverse modi di visualizzazioni:

- Foto: Visualizzazione fotografica di test e immagini
- Negativa: Lettura ad alto contrasto bianco su nero
- Positiva: Lettura ad alto contrasto nero su bianco
- Lettura ad alto contrasto bianco su blu
- Lettura ad alto contrasto blu su bianco
- Lettura ad alto contrasto giallo su nero
- Lettura ad alto contrasto nero su giallo
- Lettura ad alto contrasto giallo su blu
- Lettura ad alto contrasto blu su giallo
- Lettura ad alto contrasto verde su nero
- Lettura ad alto contrasto nero su verde

Modalità preferita

- Premendo la pulsante " Modalità " per due secondi salva il videoingranditore, l'impostazione selezionata.
- Dopo un segnale acustico, la modalità preferita è impostata.
- Questo processo può essere ripetuto tre volte.


Pulsante Foto di scena



Il pulsante Foto di scena permette di scattare una fotografia temporanea di un testo o di un'immagine.


- Porre Snow 7 HD sul testo o sull'immagine che si desidera visualizzare.
- Prema il pulsante " **Foto di scena** " sul lato superiore destro.
- La Foto die scena sarà temporaneamente memorizzata.
- Premendo i pulsanti " + " o " - " è possibile aumentare o diminuire l'ingrandimento della fotografia.
- Prema il pulsante " **Foto di scena** " un'altra volta per tornare nel modo videoingranditore.

Istruzione di scrittura

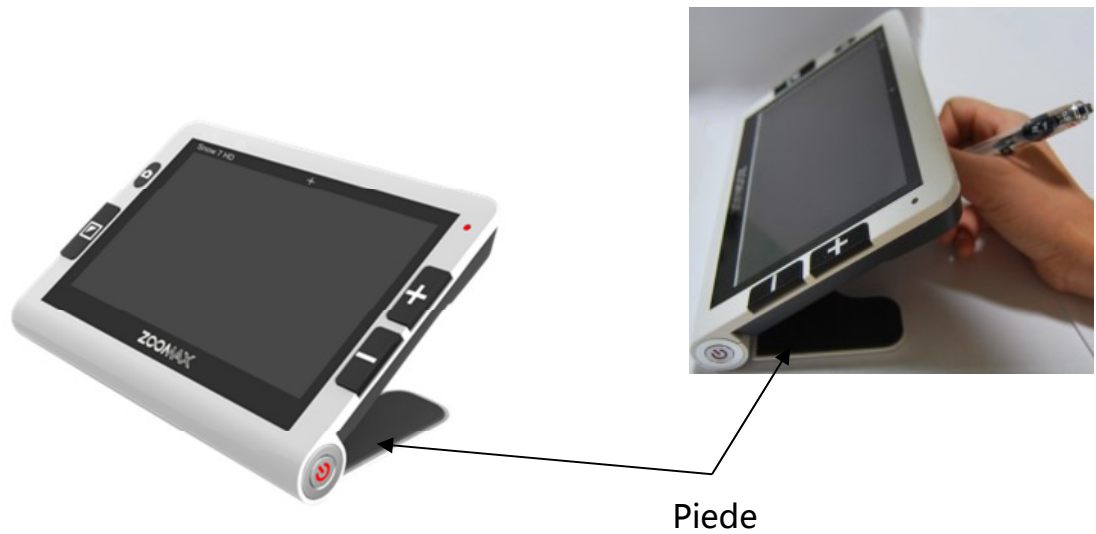


- Caratteristica unica di Snow 7 HD è che può essere usato per la scrittura. Basta aprirlo e appoggiarlo sul piede.

Segnale acustico/ spento

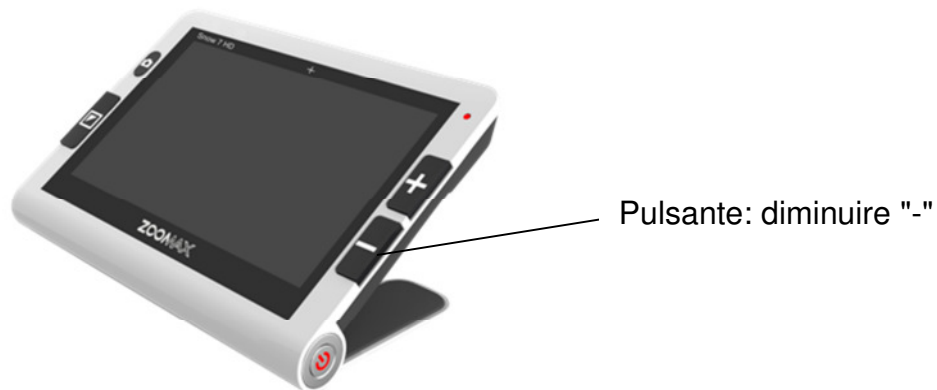

- Solitamente i segnali acustici dei pulsanti sono spenti.
- Premendo il pulsante " - " per cinque secondi fin quando si sente un segnale acustico, sono attivati i segnali acustici dei pulsanti.
- Per modificare i segnali acustici, lo schermo deve essere al minimo d'ingrandimento.

LED l'indicatore luminoso on/off

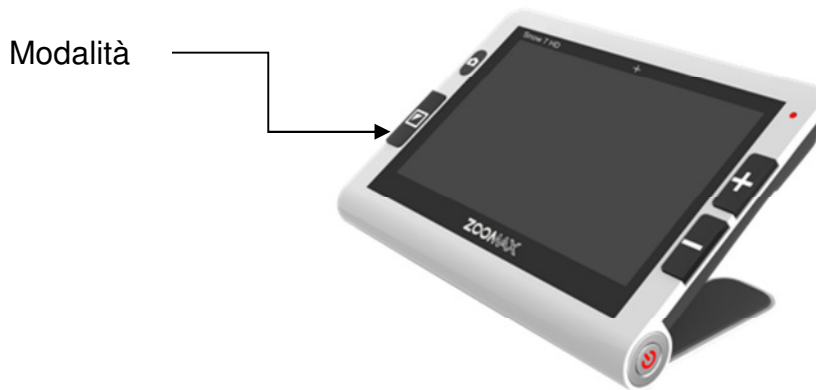

- Nella fornitura l'indicatore luminoso es spento.
- Premendo la pulsante " Modalità " per cinque secondi, fin quando si sente tre volte un segnale acustico, sono attivati gli indicatori luminosi.
- Per la disattivazione si ripete lo stesso processo.

Modificare luminosità dello schermo

- Per modificare la luminosità dello schermo preme il pulsante " **Foto di scena** " è il pulsante " + " contemporaneamente, finché viene visualizzata la barra della luminosità.
- Per più luminosità preme il pulsante " + " .
- Per meno luminosità preme il pulsante " - " .
- Per salvare è necessario premere il pulsante " **Modalità** " .

Collegamento al televisore



- Per il collegamento dallo Snow 7 HD al televisore il cavo HDMI deve essere collegato.
- Lo Schermo si spegne automaticamente e cambia nel modo di uscita HDMI.



Standby

- Consente di impostare il tempo dopo il quale Snow 7 HD entra in modo standby per risparmiare energia.
- Premendo un " **qualsiasi pulsante** " si riattiverà l'unità.
- Per impostazione predefinita, il tempo di standby è impostato a tre minuti.

Funzione di memoria

- Quando Snow 7 HD è spento, tutte le impostazioni sono memorizzate.
- La prossima volta che si accende Snow 7 HD, tutte le impostazioni sono come l'ultima volta.

Veduta vicino/a distanza

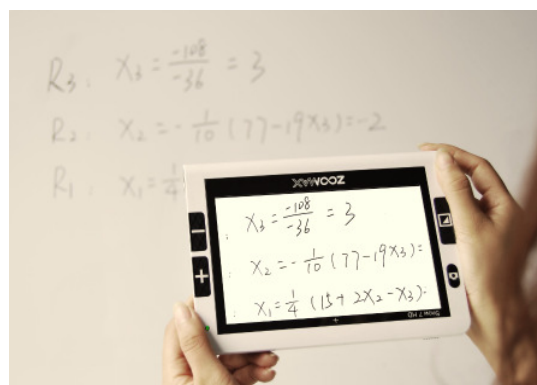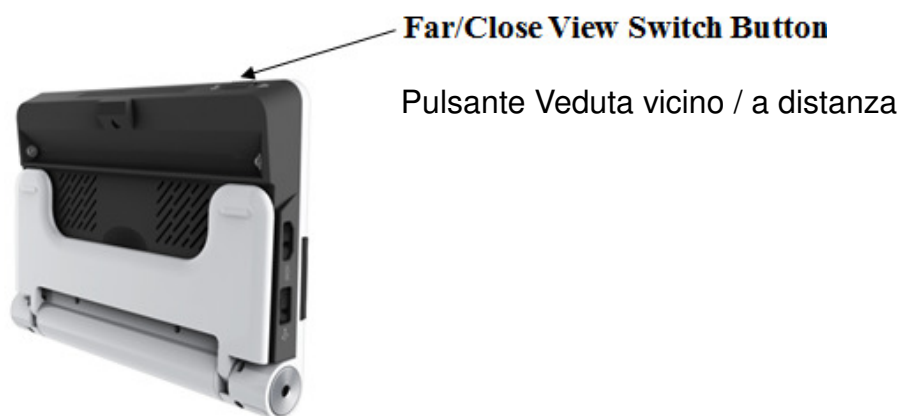

- Posizione sinistra è la veduta a distanza.
- Positone destra è la veduta per leggere.
- Per vedere meglio in distanza deve girare il videoingranditore.

Prevenzione e diagnosi dei guasti

Guastò	Soluzione
Schermo scuro	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il videoingranditore sia acceso • Cambiare la batteria • Ridurre l'ingrandimento • Controllare che il videoingranditore sia in veduta vicino/a distanza giusta
Snow 7 HD non può essere acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiare la batteria
L'immagine è sfocata	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il videoingranditore è correttamente sul giornale
Il cavo dell'alimentatore è collegato, ma ha non carica	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la presa elettrica funziona è che il cavo sia completamente inserito nello Snow 7 HD
Macchie sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire la fotocamera e lo schermo con un panno morbido
Il testo è troppo piccolo per leggere	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare lo zoom in modo che sia giusto • Collegare il dispositivo al televisore
Il testo è troppo grande per leggere	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare lo zoom in modo che sia giusto • Sollevare un po' lo Snow 7 HD dall'immagine
Il dispositivo è collegato al televisore, ma nessun immagine è visualizzata sul televisore	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il televisore sia acceso • Controllare che il cavo sia collegato correttamente
L'immagine sullo schermo è bloccata o distorta	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Modalità è il pulsante On/Off contemporaneamente per forzare un riavvio dello Snow 7 HD
<ul style="list-style-type: none"> • Non è stato possibile risolvere il problema, si prega di mettere in contatto il rappresentante locale del videoingranditore Snow 7 HD. 	

Sicurezza

Per mantenere il videoingranditore Snow 7 HD in buone condizioni, si prega di leggere le seguenti indicazioni di sicurezza:

- Non esporre Snow 7 HD a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per evitare il rischio d'incendio.
- Snow 7 HD deve essere tenuto lontano da ambienti umidi, pioggia, liquidi e sostanze chimiche.
- Snow 7 HD non deve essere utilizzato intorno dei dispositivi medici non protetti.
- Utilizzare il dispositivo in un ambiente in cui la temperatura da 10° à 40° grado Celsius.
- Non smontare le parti di Snow 7 HD. Mettere in contatto di un rivenditore autorizzato nella vostra zona.
- Non tentare di riparare l'unità. Ciò annullerebbe la garanzia.
- Rimuovere l'adattatore CA è usare un panno morbido è umido per pulire il videoingranditore. Non usare detergenti.
- Per caricare la batteria usare solo il cavo originale. Altre caricabatteria potrebbero causare danni.

Informazioni tecniche

- L'ingrandimento minimo da 2,2 volte fino a 19 volte.
- Visualizzazione con dodici diversi modi di visualizzazione.
- Negativa: Lettura ad alto contrasto bianco su nero
- Positiva: Lettura ad alto contrasto nero su bianco
- Lettura ad alto contrasto bianco su blu
- Lettura ad alto contrasto blu su bianco
- Lettura ad alto contrasto giallo su nero
- Lettura ad alto contrasto nero su giallo
- Lettura ad alto contrasto giallo su blu
- Lettura ad alto contrasto blu su giallo
- Lettura ad alto contrasto verde su nero
- Lettura ad alto contrasto nero su verde
- Dimensione schermo a sette pollici TFT
- Macchina fotografica con autofocus a 500 Pixel
- Ingrandimento a continuo
- Distanza di lettura 6,5 cm - 500 cm
- Immagine fissa, controllo dei colori, l'ingrandimento selezionabile
- Salvataggio delle impostazioni

- Snow 7 HD si spegne automaticamente dopo tre minuti se non è eseguita alcuna operazione.
- Collegamento al televisore
- Input: 110~240 V; Output: 5 V/2.5A; Power: 2.5A
- Durata media: quattro ore in uso continuo
- 4 - 5 ore per la ricarica
- Peso: 480g
- Dimensioni: 195 x 139.5 x 25 mm

*Vi augura tanta gioia e ore piacevoli con il vostro ZOOMAX
Snow 7 HD!*